



Verschlussseite / closure side / Face recto de fermeture


Impression sur le pochon (pas d'impression sur le corps du sac)  
Druck auf Huckepack (nicht auf die Tasche)




Déchirer pour ouvrir / Tear to open / Hier aufreißen / Rompa para abrir

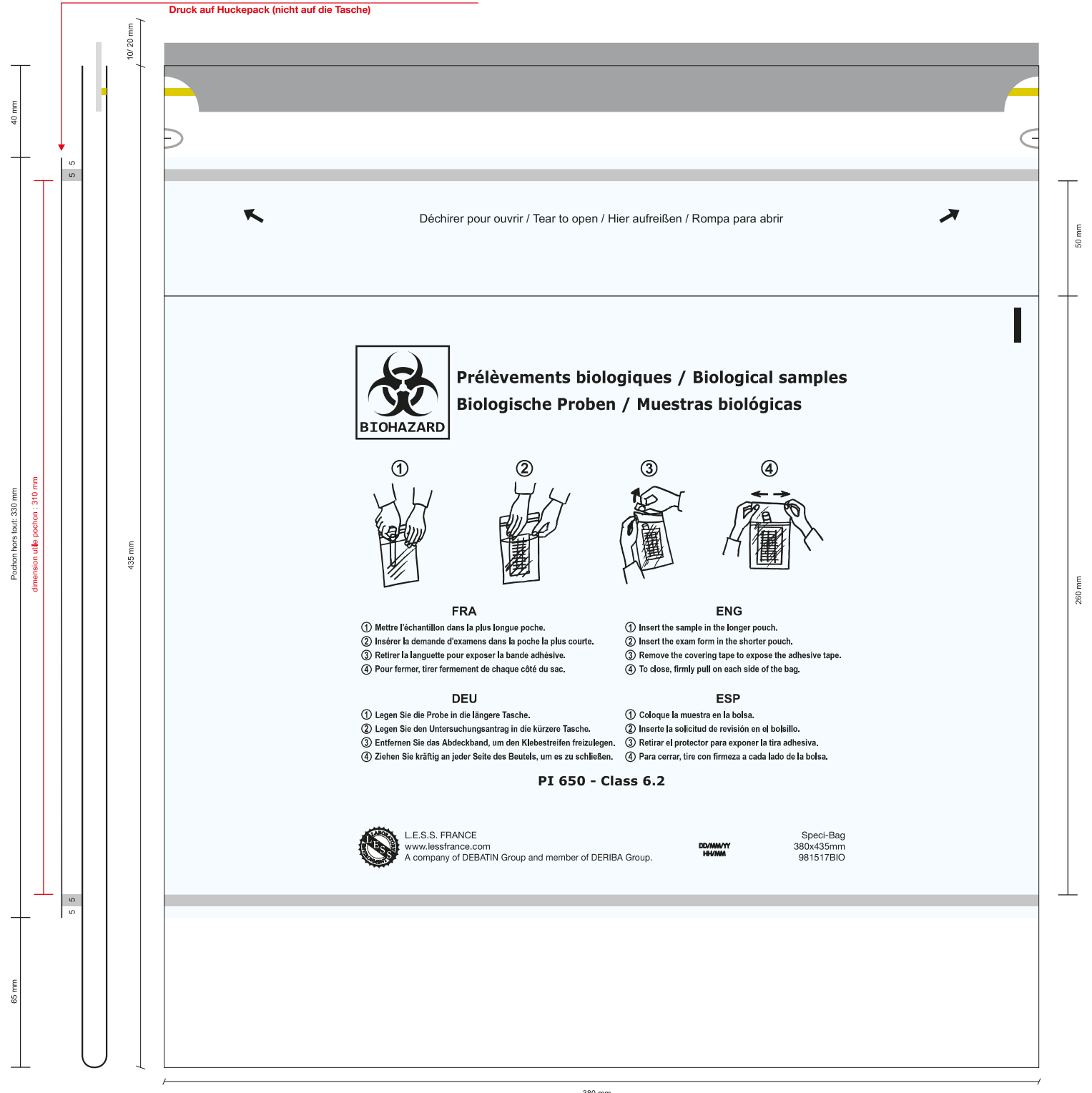


**Prélèvements biologiques / Biological samples**  
**Biologische Proben / Muestras biológicas**




①



②



③

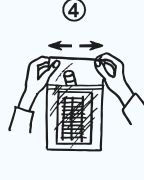

④

**FRA**

- ① Mettre l'échantillon dans la plus longue poche.
- ② Insérer la demande d'examens dans la poche la plus courte.
- ③ Retirer la languette pour exposer la bande adhésive.
- ④ Pour fermer, tirer fermement de chaque côté du sac.

**DEU**

- ① Legen Sie die Probe in die längere Tasche.
- ② Legen Sie den Untersuchungsantrag in die kürzere Tasche.
- ③ Entfernen Sie das Abdeckband, um den Klebestreifen freizulegen.
- ④ Ziehen Sie kräftig an jeder Seite des Beutels, um es zu schließen.


**ENG**

- ① Insert the sample in the longer pouch.
- ② Insert the exam form in the shorter pouch.
- ③ Remove the covering tape to expose the adhesive tape.
- ④ To close, firmly pull on each side of the bag.

**ESP**

- ① Coloque la muestra en la bolsa.
- ② Inserte la solicitud de revisión en el bolsillo.
- ③ Retirar el protector para exponer la tira adhesiva.
- ④ Para cerrar, tire con firmeza a cada lado de la bolsa.

**PI 650 - Class 6.2**



L.E.S.S. FRANCE  
www.lessfrance.com  
A company of DEBATIN Group and member of DERIBA Group.

DD/MM/YY  
HH/MM

Speci-Bag  
380x435mm  
981517BIO

Verschlussgegenseite unbedruckt / revers side not printed / verso sans impression